

着座ポジション変換機能付き歩行車



アルク

ワンタッチで歩行車ポジションと着座ポジションの変換が可能です。
安心の外出をサポートします。

より長時間、より遠くへ




フレームカラー
ラベンダーブルー



歩行車ポジション

体重を前輪と後輪の間でしっかり支え、安心して歩行ができます。

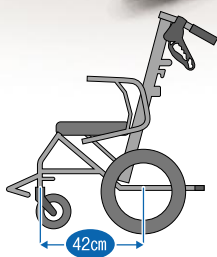

着座ポジション

取り回しのしやすい適切なホイールベース設計です。

自立します



背面 (REAR)



着座ポジション変換機能付き歩行車

アルク ¥88,000 (非課税)

00175-000244

歩行車ポジションから着座ポジションへ

1



ステップパイプを前に倒して開きます。

2



ポジションロックワイヤーを引くと、座面を持っておろすことができます。

3



座面が完全に下がり、ロックがかかれば完了です。

4



ポジションロックワイヤー先端のピンがしっかりとかかっていることを確認してください。



着座ポジションから歩行車ポジションへ

1




ポジションロックワイヤーを引くと、座面を持って上げることができます。

2



座面が完全に上がるとロックがかかります。つづいてステップパイプを上上げてためれば完了です。

3

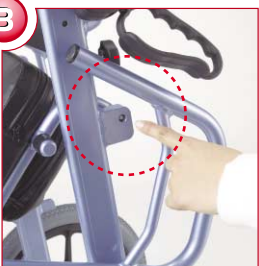

ポジションロックワイヤー先端のピンがしっかりとかかっていることを確認してください。



歩行車ポジションから折りたたみ

1



折りたたみは歩行車ポジションから行います。

2



折りたたみ防止バーを足で上に上げながら前輪キャストを浮かせると、フレームがたためます。

3



グリップをゆっくり後方に引くと自立します。

ポジション変更・折りたたみ及び開き動作は、駐車ブレーキをかけた状態で行ってください。また、必ず取扱説明書の記載事項をおまわりください。

サイズ


歩行車
ポジション



全幅
63cm

重量
11.8kg

着座
ポジション

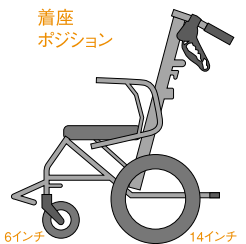

【全長】71cm 【全高】82cm※1
【グリップ高】81~93cm (6段階調節可)
【折りたたみ寸法】
全長67×全高79×全幅63cm※1
※1 グリップを最も低くした場合の寸法
※2 バックパイプ内寸法

【座面幅】38cm 【有効座幅】42cm※2
【有効座奥行】38cm
【前座高】43cm 【後座高】41cm
【座上面からバックベルト上端まで】31cm
【座上面から肘パイプ上端まで】20cm
【座上面からステップパイプまで】35cm
【全長】87cm※1 【全高】78cm※1
【グリップ高】68~79cm (6段階調節可)

アルクの安心機能




グリップ高さ調整

グリップの高さは工具いらずの調整式。使用者にも介助者にも最適な高さの設定が可能です。(6段階調整)
調整範囲 歩行車ポジション 81~93cm
着座ポジション 68~79cm



駐車機能付きブレーキ

駐車機能のついた、大きなレバーで使いやすいブレーキです。ブレーキがしっかりかかるバンド制動式。

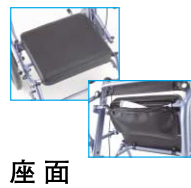

座面

厚さ3.5cmのクッション材入りで、ソフトな座りごこちです。
(座面寸法 幅38×奥行35cm)
歩行車ポジション時には裏面のポケットが使えます。(ファスター式) (ポケット内寸 タテ14×ヨコ32×マチ4cm)



前輪

安心サイズの6インチ車輪。衝撃吸収性能にすぐれたPUキャスト輪です。



後輪

メンテナンスのしやすいプラスチック製ホイール。



バックベルト

適度な張りで、背中にやさしいあたり心地です。



フロントアップパー

介助時のフロントアップ動作に有効です。

●製品のカラーにつきましては、印刷の都合上、現物とは色合いが多少異なります。●お買い上げの際は、必ず取り扱い説明書をよく読んでご使用下さい。●製品の改良・改善のため仕様を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

日進医療器株式会社

http://www.wheelchair.co.jp

本社 〒481-8681 愛知県北名古屋市沖村権現35-2
TEL (0568) 21-0635 (代) FAX (0568) 23-2787
東京営業所 〒112-0002 東京都文京区小石川1-21-14
TEL (03) 3814-0923 (代) FAX (03) 3814-4644
大阪営業所 〒533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里6-16-10
TEL (06) 6323-8265 (代) FAX (06) 6326-2554
九州営業所 〒812-0876 福岡県福岡市博多区昭南町2丁目3-8つるまる堂ビル1F
TEL (092) 513-5036 (代) FAX (092) 513-5038
東陽事業部 〒452-0901 愛知県清須市阿原北野13番地
TEL (052) 401-2741 (代) FAX (052) 401-2751